

症例別モードおよび出力設定の目安

【産婦人科】

症例名	製品名	形状 No.	モード	出力(S5)	出力(DUAL)
子宮頸部円錐切除	針電極 ロングタイプ	A3-4	BLEND COAG	20~30 15~25	25~35 20~30
	リープ電極	W1D、W2D、W3D	CUT BLEND	15~25 25~35	20~30 30~40
	止血用ボール	W18	COAG	15~25	20~30
	バイポーラ フォーセップ	ACBF-021、ACBF-022 J7、J13	BIPOLAR	10~20	10~20
コンジローム切除	ループ電極	B1D ラウンド型	CUT	10~15	15~20
		C3D ダイヤモンド型	BLEND	10~20	15~25
組織生検	ダイヤモンド電極 ロングタイプ	C3-4	CUT	10~20	15~25
びらん焼灼	ボール電極	D8D	COAG	10~15	10~15
		F1D	FULGURATE	15~20	15~20
腹腔鏡補助下手術	婦人科ロング シャフト電極	L4	BLEND	30~40	35~45
		L6	BLEND COAG	30~40 25~35	35~45 30~40
子宮筋腫	ブレード電極	E3D	BLEND COAG	40~50 25~35	50~60 30~40
		E4D	BLEND COAG	25~35 20~30	30~40 25~35
子宮腺筋症	ブレード電極	E4D	BLEND COAG	25~35 20~30	30~40 25~35
			BIPOLAR	10~20	10~20
子宮体癌 傍大動脈リンパ節 郭清	ブレード電極	E3D	BLEND COAG	40~50 25~35	50~60 30~40
		E4D	BLEND COAG	25~35 20~30	30~40 25~35
	吸引式凝固電極	IEC-H40	COAG	20~30	25~35
	モノポーラ フォーセップ	IEC-MJ11/M	BLEND COAG	35~45 30~40	
		IEC-MJ11、IEC-MJ23	BLEND COAG	50~60 40~50	

※モノポーラを使用する際は、必ず対極板を患者様に接地してご使用ください。

※出力設定はあくまでも目安となります。切開・凝固時の組織への変化を見ながら調整してください。

ellman 高周波ラジオ波メス・サージトロン

2016.09.01 現在



(8006)80033020(10)201404