

症例別モードおよび出力設定の目安

【眼科】

症例名	製品名	形状 No.	モード	出力(S5)	出力(DUAL)
皮膚切開	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT	8～11	10～14
眼瞼下垂	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT BLEND COAG	8～11 10～20 7～11	10～14 13～20 10～13
	バイポーラ フォーセップ	J1	BIPOLAR	1～3	2～3
内反症	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT BLEND COAG	8～11 10～20 7～11	10～14 13～20 10～13
	バイポーラ フォーセップ	J1	BIPOLAR	1～3	2～3
睫毛電気分解	マイクロ 絶縁針電極	H137	COAG	1～3	2～5
結膜弛緩症	ボール電極	D8D	COAG	7～11	10～13
	バイポーラ フォーセップ	J1	BIPOLAR	1～3	2～3
涙嚢鼻腔吻合術	エンパイア ニードル電極	Y-DCR	BLEND	20～30	25～35
	吸引式凝固 電極	H47（細）	COAG	15～25	20～30
		H48（中）	COAG	20～30	25～35
		H49（太）	COAG	25～35	30～40
脂漏性角化症 （扁平な母斑）	ボール電極	D8D、F1D	COAG FULGURATE	10～15 15～20	10～15 15～20
隆起性病変	ループ電極	B1D ラウンド型ループ電極 C3D ダイヤモンド型ループ電極	CUT BLEND	10～15 10～20	15～20 15～25
	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT BLEND	8～11 10～20	10～14 13～20

※モノポーラを使用する際は、必ず対極板を患者様に接地してご使用ください。

※出力設定はあくまでも目安となります。切開・凝固時の組織への変化を見ながら調整してください。

2016.09.01 現在



(8006)80033020(10)201404