



マイクロ絶縁針電極（形状 No.H137）使用方法

マイクロ絶縁針電極（形状 No.H137）（単回使用）は専用のハンドピース「マイクロ絶縁針用ハンドピース」が必要です。電極固定口の形状が通常のハンドピースと違います。

マイクロ絶縁針用
ハンドピース
電極固定口形状

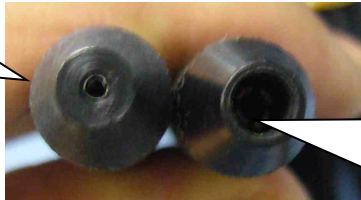


標準ハンドピース
電極固定口形状
H137 には使用できません

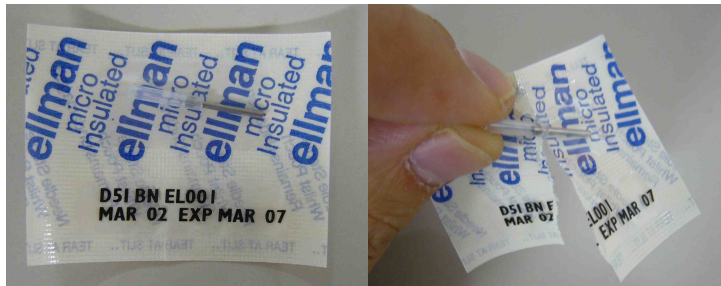


滅菌袋に入っているマイクロ絶縁針電極（形状 No.H137）を取り出します。

注：滅菌期限にご注意ください。

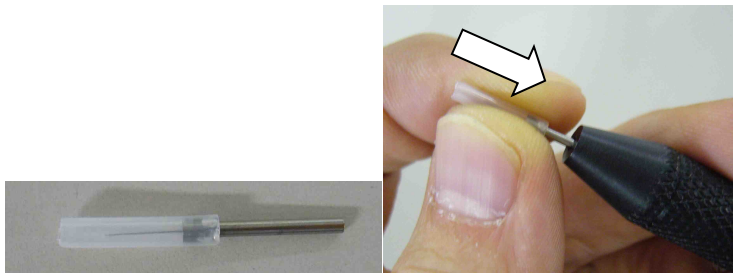

キャップを付けたままハンドピースに差し込みます。

注：ハンドピースに固定する前にキャップを外さないでください。

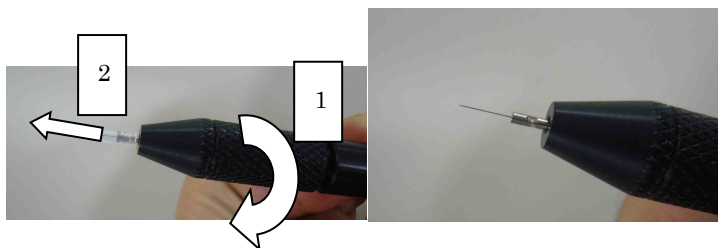

奥までしっかりと差し込んでからハンドピース部を回して固定します。固定したら電極キャップを慎重に抜きます。

準備が整いました。これで使用できます。（注：先端が非常に細いので注意してご使用ください。）

サージトロン FFPF/EMC の場合【モード：止血／凝固 出力：1 以下】

サージトロン DualEMC/pelleve S5 の場合 【モード：止血／凝固 出力：2】



使用後、キャップを被せて電極をハンドピースから抜いて適切に処理してください。

注：通電部は非常に細いため取扱は慎重に行ってください。曲がったりした場合は絶縁部分が剥がれた可能性があるため、新しい電極と交換してください。