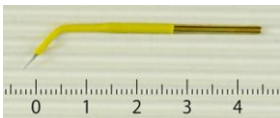
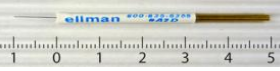
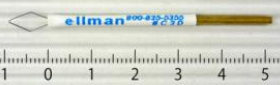
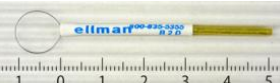
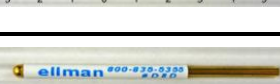
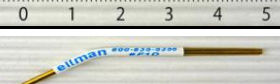


ellman高周波メス・サージトロンデュアル

モードおよび出力設定の目安（獣医科）

適応箇所/使用場面	商品名	形状No	形状	用途	モード、初期出力目安	
					CUT	BLEND
皮膚切開、浅層部切開	エンハイニードル電極	EE301 EE305	 ※直型はEE301	切開	15～	20～
				止血	COAG 25～35	
ピンポイント凝固 バイポーラ切開	ハイポ・ラフォーセップ	J1		止血	BIPOLAR 3～	
広範囲凝固 シーリング	Aceハイポ・ラフォーセップ	ACBF-017		止血	BIPOLAR 10～	
皮膚切開用	滅菌済 針電極	A2D		切開	CUT	BLEND
					10～	12～
皮膚切開用	滅菌済 ハリ・チップ電極	A8D		切開	CUT	BLEND
					10～	12～
組織切除：平坦切除 （隆起性腫瘍など）	滅菌済 ダイヤモンド型ループ電極	C3D		組織切除	CUT	BLEND
					15～	20～
組織切除：ループ切除 （隆起性腫瘍など）	滅菌済 ラウンド型ループ電極	B1D		組織切除	CUT	BLEND
					15～	20～
組織切除：ループ切除 （隆起性腫瘍など）	滅菌済 ラウンド型ループ電極	B2D		組織切除	CUT	BLEND
					20～	25～
切開・凝固 （通常電気メスとしての 使用）	滅菌済 プレート型電極	E3D		切開	CUT	BLEND
				止血	COAG 40～	
止血・凝固	滅菌済 ボール型電極	D8D		止血	COAG	FULIGURATE
					20～	25～
凝固・蒸散	滅菌済 焼灼用電極	F1D		止血 （ピンポイント）	COAG	FULIGURATE
					20～	25～
脱毛 睫毛電気分解	マイクロ絶縁針電極 ※専用ハンドピースへ のみ接続可能	H137		凝固	COAG 2～	
					BIPOLAR 15～25 （5～10秒通電）	
シーリング	バイポーラクランプ	SCBI-01		凝固	BIPOLAR 15～25 （5～10秒通電）	