


エルマン RFナイフ 「サージトロンDualEMC」

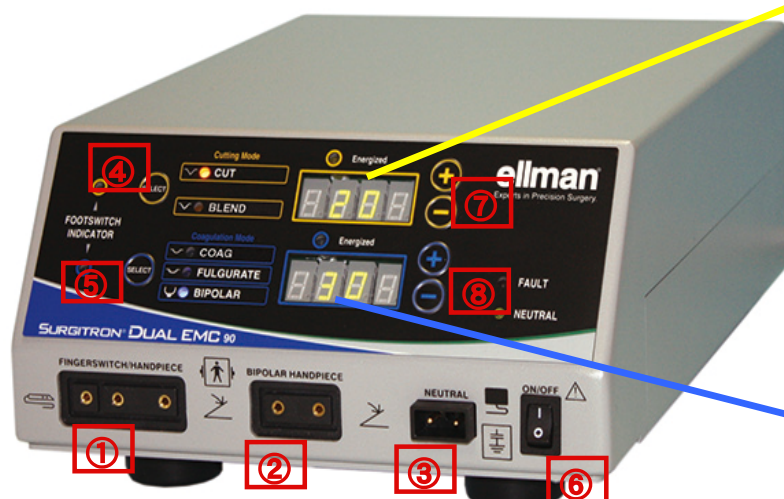

初期出力設定目安


CUT(純切開) : 10~20
BLEND(混合切開) : 10~25

※出力設定値はあくまでも目安です。
状況に応じて変更する必要があります。

初期出力設定目安

COAG(止血・凝固) : 10~20
FULGURATE : 10~20

＜本体コード接続方法＞ (背面部分)

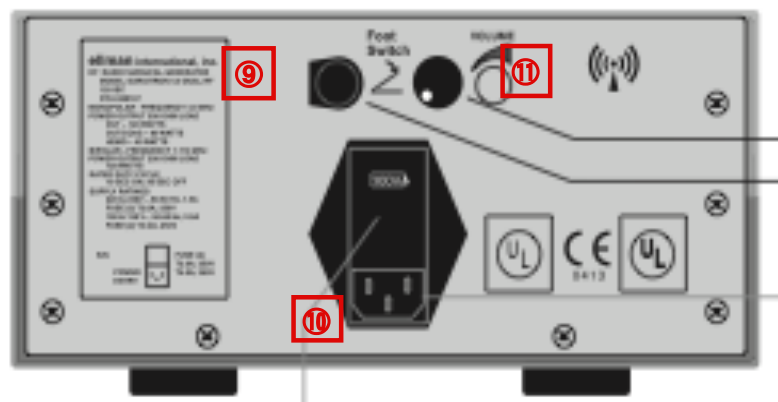

【各部名称】

- 1 : ハンドピース差し込み口
- 2 : バイポーラコード差し込み口
- 3 : 対極板差し込み口
- 4 : 出力モード切り替えボタン1
- 5 : 出力モード切り替えボタン2
- 6 : 電源ボタン
- 7 : 出力設定ボタン1
- 8 : 出力設定ボタン2
- 9 : フットスイッチ接続口
- 10 : 電源ケーブル接続口
- 11 : 音量調節スイッチ

⑨にフットスイッチのケーブルを差し込みます。

※ケーブルの形状にそって差し込んでください。外す際はケーブルのボタンを押しながら着脱してください。

⑩に電源ケーブルを差し込みます。

※差し込める方向が一定になっておりますので、方向にご注意ください。