
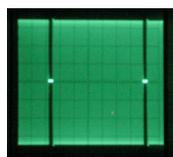



<出力方法> 2種類の出力方法があります。

①3ツボタンハンドピースによるコントロール

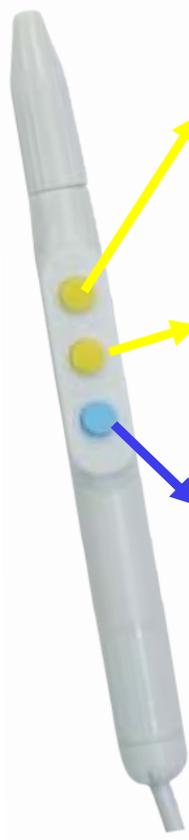


「CUT（純切開）モード」：90%切開10%凝固

エネルギーを連続して与えて細胞中の水分を気化爆発させ、非常に損傷が少なくシャープな切開を提供します。

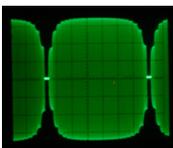

「BLEND（混合切開）モード」：50%切開50%凝固

出力をするしないを交互に行うことにより、組織収縮を促し出血をコントロールしながら切開が出来るモードです。

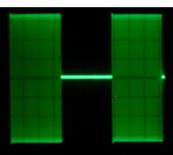

「COAG（止血・凝固）モード」：90%凝固10%切開

エネルギーを断続的に与えて細胞中の水分を蒸発させます。細胞収縮を促し血管や血管周りの組織を収縮し止血します。

