




# 歩行器

## 歩行器の使い方

### 固定型

フレームが固定されている歩行補助器です。

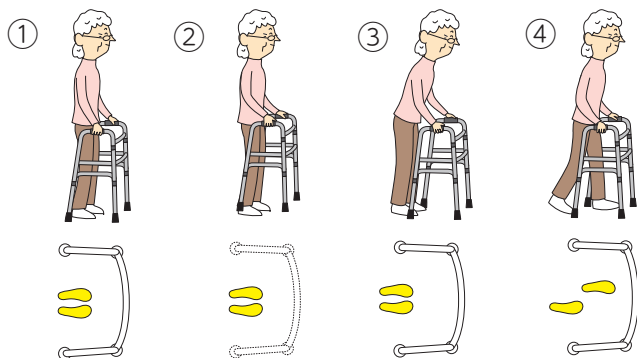

- ①歩行器のグリップをしっかりと握る。
- ②③持ち上げて前に出す。
- ④少しずつ移動する。

### 固定型



セーフティーアーム  
ウォーカー(P93)



セーフティーアーム  
ウォーカーSS(P93)

### キャスター付




セーフティーアーム  
Vタイプウォーカー(P94)



セーフティーアーム  
ウォーカーCタイプ(P93)

### キャスター付

脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。

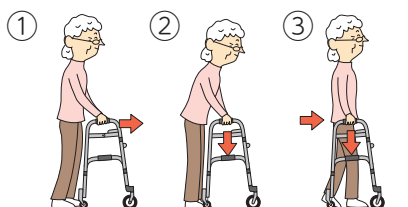

- ①歩行器を前に出す。
- ②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
- ③身体を少しずつ移動する。

### 前輪360°



ハッピーミニ  
(P97)



ハッピーII(P97)



ハッピーIIトール  
(P97)

## 握手

### 持ち運びに便利



ヘルシーワンキャンシット  
ヌーボー(P95) ヘルシーワンライト  
カラフル(P95)



ヘルシーワンW  
(P95) ピュプレスタマム  
(P95)



ヘルシーワンレジェール  
(P95)

### コンパクトタイプ



シンフォニーSP  
(P96) アイルウォークα  
(P96)



テイコプリトル  
(P96) テイコプリトル  
ハイII(P95)



アイルウォークライト  
(P96)

### 買い物に便利



テイコプリトル  
ワゴン(P98) ショッピング  
ターン(P98)



シンフォニー  
ラクーン(P98) セーフティーアームロータ  
SPタイプ(P98)



スムーディ(買物用)  
カウサポ(P98) シンフォニー  
スリムBOX  
(P98)