

自立歩行が可能な方が外出する際に大きな手助け。

シルバーカーのタイプ別。

コンパクトタイプ

軽量・コンパクトで持ち運びに便利。電車やバスの利用機会が多い方におすすめです。

持ち運び	収納	安定性
◎	△	○



ミドルタイプ

軽量で安定感があり、適度な大きさと収納力があります。お散歩や買い物と幅広く使えます。

持ち運び	収納	安定性
○	○	○



ボックスタイプ

全体の幅が広く、車輪も大きいいため最も安定性に優れます。収納スペースが大きく、買い物にも最適です。


持ち運び	収納	安定性
△	◎	○



ポイント

持ち手高さの目安

一般的に、肘を30°～45°程度に曲げた高さが押しやすい高さとなります。持ち手の高さが合わない、姿勢が悪くなったり歩行が不安定になります。

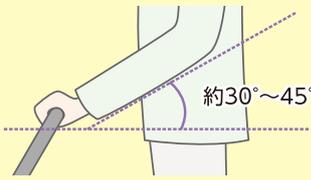

前輪キャスターの違い



シングル
直進性に優れる。軽量なタイプに多い。



ダブル
操作時の横ブレが少ない。路面の溝や穴に落ちにくい安定タイプ。

キャスターは、大きく分けて3種類あります。前輪キャスターにあるツマミで簡単に切替が出来ます。



3WAYタイプ

直進固定、左右首振り、360°回転の3つの角度より選択できるタイプ。

2WAYタイプ

直進固定・左右首振り。又は直進固定・360°回転の2つの角度より選択できるタイプ。

1WAYタイプ

直進固定のみ。又は360°回転のみのタイプ。

歩行器の種類。

歩行車

左右の歩行バランスを保ちやすいタイプです。グリップ形状や車輪の大きさなど様々なタイプがあります。




歩行器(馬蹄型)

主に屋内で使用します。病院や施設内でよく見かけるタイプです。掌で体重支持が出来ない場合などに使用します。



歩行器

屋内の歩行補助に適しています。1本杖、多点杖での歩行が不安定な方も安心して安定した歩行が行えるようになります。

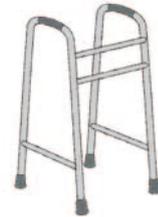

横押しカート 一覧表

掲載ページ	商品名	定価(税抜)	幅(cm)	奥行(cm)	ハンドル		重量(kg)	キャスター		ブレーキ	
					高さ(cm)	段階調節		切替	角度調整	手元	駐車
041B-01	アイカートフリー No.835	29,800円	32.6	23	64.8～86	5	2.8	1WAY	360°	○	○
041B-02	アイカートネオ No.833	27,800円	38	21	64.8～86	5	2.6	2WAY	0°・45°	○	○
041B-03	メロディカーゴ	22,000円	35	26.5	67～91	7	2.3	1WAY	360°		○ (ストップ)
041B-04	メロディ スムーズ	24,300円	30.5	23.5	68～84	5	2.5	1WAY	360°		○
041B-05	メロディ スムーズ グランデ	25,500円	37	23.5	68～84	5	2.5	1WAY	360°		○
041B-06	メロディ プリモ(右用・左用)	27,000円	36.5	24	72～84	4	2.5	2WAY	0°・50°	○	○
041B-07	メロディ プリモ グランデ	27,000円	37	24	72～84	4	2.6	2WAY	0°・50°	○	○
041B-08-①	キャリアライトSN (ブラック)	28,000円	36.5	23.5	66.5～86.5	6	2.6	2WAY	0°・35°	○	○
041B-08-②	キャリアライトSN (バイズリーブルー・タータングリーン)	30,000円	36.5	23.5	66.5～86.5	6	2.6	2WAY	0°・35°	○	○
041B-09	aカートショッピングキャリア WCC15	15,800円	32	22.5	64.5～87.5	6	2.3	1WAY	360°		
041B-10	aカートショッピングレインバッグ(ストッパー付) WCC14	21,100円	32	22.5	64.5～87.5	6	2.7	1WAY	360°		○

介護保険制度

衣類・肌着・靴下

歩行補助用品

車いす・車いす関連用品

ベッド関連用品

床ずれ防止関連用品

移乗用品

入浴関連用品

排泄・トイレ・おむつ用品

住宅・安全管理

介護予防・レクリエーション

施設用品・コミュニケーション・防災用品

食事・口腔ケア

自活・自助具

生活・健康用品