



スロープ

【単位: cm】

スロープの選び方

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	傾斜角度 5 度	傾斜角度 8 度	傾斜角度 10 度	傾斜角度 15 度
	介助なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
スロープ長	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ
40cm	3cm	5cm	6cm	10cm
65cm	5cm	9cm	11cm	15cm
1.0m	8cm	13cm	17cm	24cm
1.2m	10cm	16cm	20cm	30cm
1.5m	13cm	20cm	25cm	37cm
1.75m	15cm	24cm	30cm	43cm
2.0m	17cm	27cm	34cm	50cm
2.4m	20cm	33cm	41cm	60cm
2.85m	24cm	39cm	49cm	73cm

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。

ケアスロープ詳細表 (P63)

【ケアスロープJ 組合せ・適応段差目安表】

下端部スロープ種類 下端部適応段差目安		CS-150	CS-175	CS-200	CS-240C	CS-285C
上端部スロープ種類 上端部適応段差目安		21cm(8°) ~ 26cm(10°)	21cm(7°) ~ 26cm(9°)	21cm(6°) ~ 26cm(8°)	21cm(5°) ~ 26cm(6°)	21cm(4°) ~ 26cm(5°)
CS-150	38cm(8°) ~ 53cm(12°)	CSJ-300	CSJ-325	CSJ-350	CSJ-390	CSJ-435
CS-175	41cm(8°) ~ 58cm(12°)	CSJ-325	CSJ-350W	CSJ-375	CSJ-415	CSJ-460
CS-200	44cm(8°) ~ 63cm(12°)	CSJ-350	CSJ-375	CSJ-400	CSJ-440	CSJ-485
CS-240C	50cm(8°) ~ 71cm(12°)	CSJ-390	CSJ-415	CSJ-440	CSJ-480	CSJ-525
CS-285C	56cm(8°) ~ 81cm(12°)	CSJ-435	CSJ-460	CSJ-485	CSJ-525	CSJ-570

【ケアスロープJC 組合せ・適応段差目安 / 必要設置寸法表】

品番	使用スロープ	適応段差	傾斜角度	必要設置奥行寸法	必要設置幅寸法
CSJC-150	CS-150	30cm	12°	155cm 以上	255cm
CSJC-175	CS-175	30cm	10°		280cm
CSJC-200	CS-200	35cm	10°		300cm
CSJC-240	CS-240C	40cm	10°		340cm
CSJC-285	CS-285C	50cm	10°		390cm

【パーツサイズ詳細表】

ジョイント台(ケアスロープJ用)	カーブパーツB(ケアスロープJC用)	傾斜補正台(ケアスロープT用)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。