

スライディングシート

介護負担の軽減・腰痛防止に! 持ち上げて動かす介護から持ち上げない介護へ

移乗用具は、介助される方の腰痛保護だけでなく利用者の身体保護も目的にしており、摩擦や圧の集中を出来るだけ少なくなるよう活用しましょう。

スライディングシート 摩擦の少ない素材のシートを筒状にしたもので、ベッド上での移動や寝返り、移乗などの際に使用することで、軽い力で動作を行うことができ、介助者やご本人の負担を軽減することができます。

1 ウェルファン スライディングシートシリーズ

646074 介助らくらくシート

①介助らくらくシート S	3,300円(税抜3,000円)
②介助らくらくシート M	6,600円(税抜6,000円)

646087 トランスファーシート(通常タイプ)


③トランスファーシート S	3,850円(税抜3,500円)
④トランスファーシート M	7,700円(税抜7,000円)
⑤トランスファーシート L	9,350円(税抜8,500円)

646082 トランスファーシート(フラットタイプ)

⑥トランスファーシートフラット S	4,950円(税抜4,500円)
⑦トランスファーシートフラット L	8,250円(税抜7,500円)




一方向に滑ります。
生地が丈夫で、耐久性が高く、初めて使用される方、ご利用者の協力を得られる場合にオススメです。

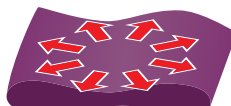


上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
薄手で敷き込みやすく、斜めにも移動可能です。
フラットタイプは筒状になっていない1枚タイプより活動範囲が広がります。


①介助らくらくシート S

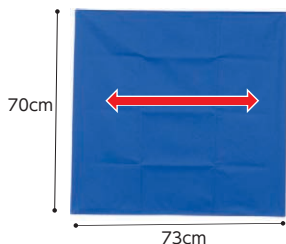


②介助らくらくシート M

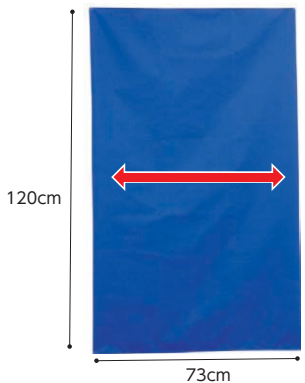


③トランスファーシート S

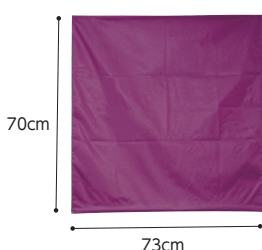

④トランスファーシート M

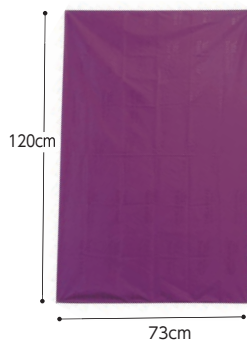


⑤トランスファーシート L

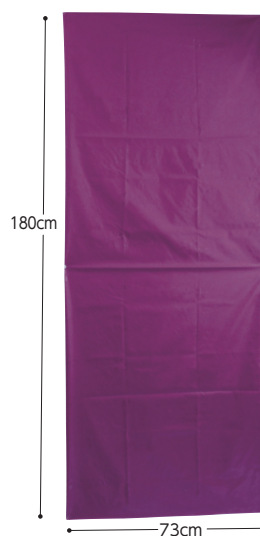


(フラットタイプ)

筒状ではない1枚タイプ。2つ折りにして重ねて使用します。

⑥トランスファーシートフラット S

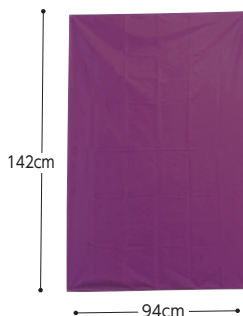

⑦トランスファーシートフラット L

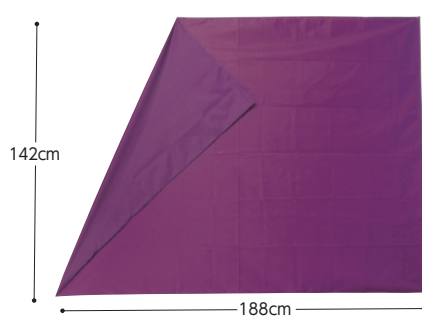

こんな場合にも

手や足のトレーニングに

少しの力で動くスライディングシートなので手や足を動かすトレーニングにも使用できます。



寝返りの補助に

ベッド上の移動だけでなく、寝返り等の補助にも使用できます。



●材質/ナイロン ●お手入れ/洗濯可(洗濯ネット、中性洗剤使用。漂白剤や柔軟剤は使用不可。)、乾燥機・アイロン不可。ドライクリーニング不可。
TAIS/①00082-000076 ②00082-000070 ③00082-000071 ④00082-000072 ⑤00082-000073 ⑥00082-000074 ⑦00082-000075

ウェルファン

(スライディングシートのサイズの選び方)

ポイント


利用者の **身長** や **身体機能** に合わせて選びましょう!

対象者像

①足を立てて腰を持ち上げられる


②足を立てれるが腰は持ち上げられない

③足を立てられない

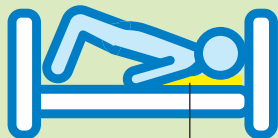


敷き込み範囲
頭部から肩甲骨

目安サイズ
S

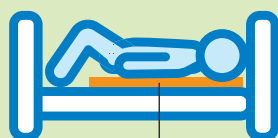

敷き込み範囲
頭部から腰

目安サイズ
M

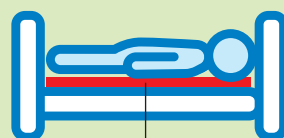

敷き込み範囲
頭部から脚

目安サイズ
L