移乗用品

口腔ケア

生活

紙おむつを選ぶポイント

どの程度、動くことができますか?



寝たきり



介助があれば

起きあがれる

テープタイプ

●構モレ、背モレを防いで通気性も高い。

●介護者にもやさしい消臭効果。



座れる



立てる





立てる 歩ける



介助があれば 介助があれば



●紙パンツ専用のパッドがおすすめ。







●軽い力で上げ下げできます。 ●フィットするうす型がおすすめ。

-口介護メモ

大人用紙オムツは医療費控除が受けられます。このカタログに 掲載の紙オムツは医療費控除の対象品です。

紙オムツを使う方がかかっている医院や病院で 「オムツ使用証明書」を発行してもらいます。



資料提供:(株)光洋-ディスパース

発行後、大人用紙オムツの領収書を保存しま す。領収書には、販売店の方に、「大人用紙オ ムツを使う人の名前・商品名」を記入してもら います。



3 大人用紙オムツ代を含めて、医療費が10万 円を越えた場合、確定申告の時期に医療費控 除の申告をします。その際、領収書と共に「オ ムツ使用証明書」も添付します。




紙おむつの使い方

●テープタイプ


おむつのシワを伸ばしながら広げます。 その際、吸収部分の片寄を防ぐ為、おむつをバ サッと振らないように注意しましょう。 体型に合わせてテープの向きに一工夫。



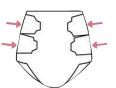

下肢が開いて いる方へ



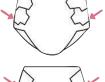



●尿とりパッド

尿とりパッドは、おむつの中に入れて使う吸収パッ ド。おしっこをするたびにパンツやテープ式ごと取 り替えるのではなく、汚れた尿とりパッドだけを抜 き出して新しいものに取り替えることができま す。



〈吸収体の形を使い分けましょう〉

パッド山折り



すき間ができやすい 方や、尿がパッドに片 寄って吸収しがちな 方に有効です。

パッド谷折り



出血や帯下(おりも の)がある方、尿が前 側に回りやすい方、男 性、便が漏れやすい方 に有効です。

●パンツタイプ

ウエスト位置までしっかり引き上げます。はきや すく、上げやすいおむつを選ぶことが大切です が、介護する方は、背中側をしっかり引き上げま しょう。特に腰が曲がっている方はその傾向があ ります。肌着の裾をはさみ込んでしまうと、肌着 を伝ってモレる場合があります。



使用前に一度全体を伸ばすことで伸縮しやすくな り、履き心地が良くなります。

〈汚れたパンツを脱ぐ場合〉



下から破ります

交換のときは下着のように下げるか、横のつなぎ 目を下側からやぶいて捨てることができます。

1 ポイズ 肌ケアパッド

955634 少量用

120cc/170cc

発生したニオイをすぐに消臭して 1袋 **797**円(税抜725円) **ニオイ戻りも防ぐ! ●**お肌に優しい素肌と同じ弱酸性

各 1,243円(税抜1,130円) のやわらかシート







●1枚のサイズ/少量用=8.5× 23cm、120cc=10.5×27cm、 170cc=12×30cm ●袋入数/ 少量用=30枚、120cc=20枚、 170cc=16枚 ●ケース入数/少 量用、120cc=12袋、170cc=9袋

長時間夜も 約170 安心用スーパー

日本製紙クレシア 在

2 さわやか男性用安心パッド



419363 男性用120cc

1袋1,023円(税抜930円)

男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」尿もれケアパッド ●「前側ワイド形状」で、体の前側を幅広くカバー。



※ボクサー・ブリーフなど のピッタリした下着に ご使用ください。

●1枚の長さ/26cm ●袋入数/少量用=16枚 ●ケース入数/24袋

ユニ・チャーム 在

3 リフレ 超うす安心パッド

1)50cc/2120cc/3170cc

④200cc/⑤230cc 各**1,078**円(税抜980円)

超うす型なのに安心のサポート!

- ●超薄でつけていないような心地よさ! ●横モレ安心ガードで尿をせき止めモラし ません。(中量用を除く)
- ●裏面に、下着にぴったりズレないテー プ付き。
- ●1枚のサイズ/①=8.5×19cm、②=9.5× 23cm、③·④·⑤=13×29cm
- ●ケース入数/①~⑤24袋
 - リブドゥコーポレーション 在



①中量用

50c







801041 ③長時間夜も安心用 170_c



④特に多い時も快適用 200a



