
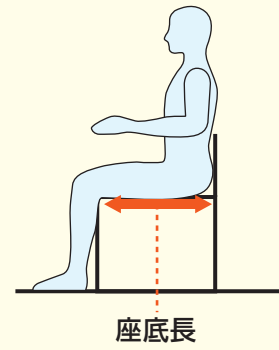
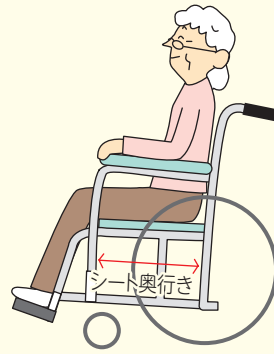


### 座シートの奥行き

#### ▶座底長-50 ~ 70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。

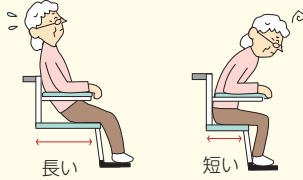

### アームサポートの高さ

#### ▶座位肘頭高+10 ~ 20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。

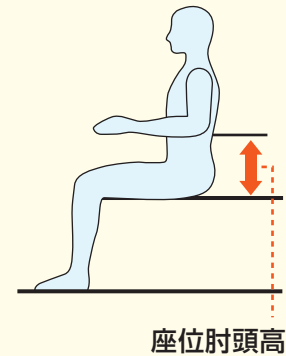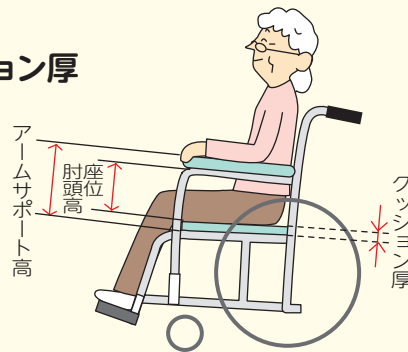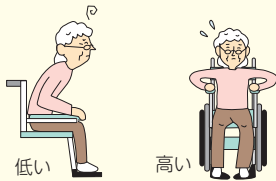

### レッグサポートの長さ

#### ▶座位下腿長-クッション厚



レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。

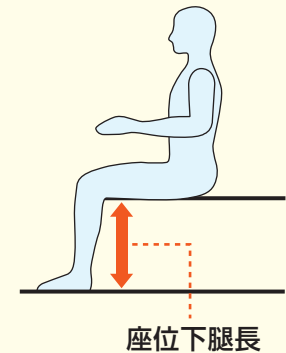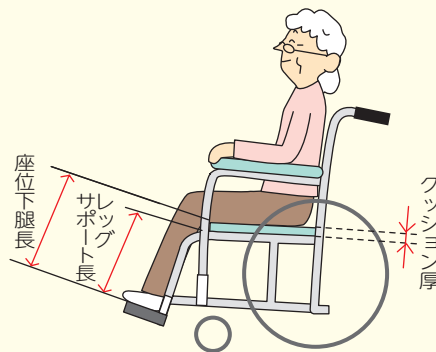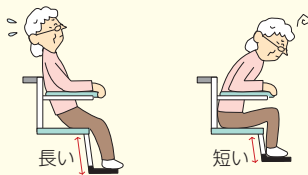

### 座シートの高さ

#### ▶座位下腿長+20 ~ 50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせて。介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。

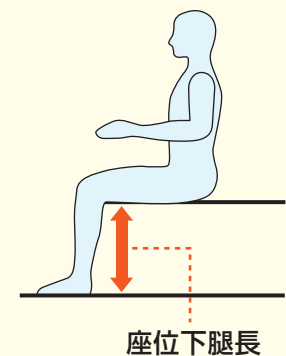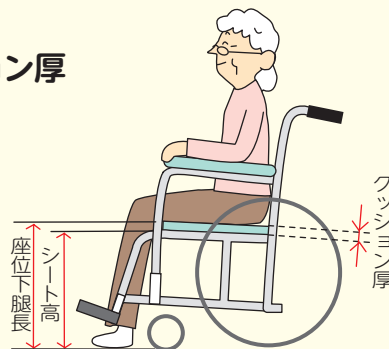

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について